

Entnehmen eines Glases



Halten Sie die Fassung wie auf dem Bild gezeigt mit festem Griff in der Hand.



Legen Sie einen Finger am Rand des Gelenks auf den Bügel um unkontrolliertes Herauspringen der Arretierung und eine daraus folgende Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

Führen Sie das beiliegende Werkzeug in den Schlitz am Gelenk ein.



Achten Sie darauf, dass der untere Teil des Gelenks nicht die Oberfläche der Fassung beschädigt.

Durch kontrolliertes Drehen im Uhrzeigersinn des Werkzeugs springt der Haltering des unteren Fassungsteils aus seiner Arretierung.



Achten Sie darauf, dass der untere Teil des Gelenks nicht die Oberfläche des Glases beschädigt.

Führen Sie das Glas vorsichtig aus der Fassung.



Achten Sie darauf, dass der untere Teil der Fassung nicht zurückschnappt.

Halten Sie das Glas und entspannen die Fassung. Die Fassung ist nun bereit neu verglast zu werden. Nutzen Sie die Gelegenheit um das Gelenk zu schmieren und die Fassung zu pflegen.


ACHTUNG!

Versuchen Sie **niemals** den Bolzen zu entfernen oder den silbernen Sicherungsring zu öffnen. Dies darf nur durch den Hersteller erfolgen. Der Bolzen ist eingepresst. Der Versuch den Bolzen zu entfernen zerstört die Fassung.

Einsetzen eines Glases



Halten Sie die Fassung mit festem Griff in der Hand. Legen Sie das Glas zunächst am Steg an. Führen Sie den unteren Rahmenteil in die Nut des Glases.

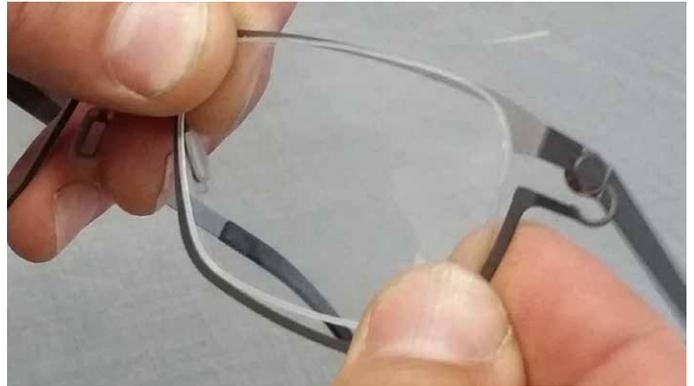

Um den Rechten unteren Teil des Rahmens in die Nut zu führen, kippen Sie den Rahmen leicht zu sich und nach unten.



Nun lässt sich der untere Rahmen einfach in die Nut einführen. Danach legen Sie das Glas auch oben an und führen die Fassung in die Nut des Glases.



Führen Sie nun den offenen Bogen des Gelenks zum Bolzen und legen die Spitze in den Spalt zwischen Bolzen und Bügel.



Behutsam schieben Sie bis zum Widerstand den Bogen ein.



Mit einem letzten festen Druck rastet der Bogen in seine Arretierung ein. Das Gelenk ist nun geschlossen und hält das Glas sicher.